



## KaVo PROPHYflex™ Perio Powder – 1.009.3732

### Instrucțiuni pentru utilizator

KaVo, PROPHYflex și PROPHYflex Perio Powder sunt mărci înregistrate sau mărci ale KaVo Dental GmbH.

Toate celelalte mărci sunt proprietatea titularilor mărcilor respective.

### Serviciul KaVo de asistență tehnică

În cazul unor întrebări de natură tehnică sau reclamații, vă rugăm să vă adresați serviciului KaVo de asistență tehnică:

+49 (0) 7351 56-1000

service.instrumente@kavo.com

### Grup țintă

Instrucțiunile de utilizare sunt destinate personalului medical de specialitate, inclusiv medici stomatologi și personal practicant.

### Marcaje generale și simboluri

Informații importante pentru utilizator și tehnician

Modalitate de acționare

Respectați instrucțiunile de utilizare

Respectați instrucțiunile electronice de utilizare

Atenție: Respectați documentele anexate

Cod HIBC

Marcaj CE produse medicale

Produs medical, marcarea produselor medicale

Temperatura de depozitare: Între -10 °C și +25 °C (între +14 °F și +77 °F)  
Temperatura de transport: Între -10 °C și +40 °C (între +14 °F și +104 °F)

Umiditate relativă a aerului: Între 10 % și 85 %, fără condens

Presiunea aerului: 700 hPa până la 1060 hPa (10 psi până la 15 psi)

A se proteja împotriva umezelii

Aveți în vedere data expirării

Producător

Data producției

Lot de producție

Cantitate

Nu reutilizați - numai pentru o singură utilizare

A se scutura înainte de utilizare

Reciclabil

### Transportul și depozitarea

- ▶ A nu se depozita în apropierea surselor de căldură.
- ▶ A se depozita la temperaturi între -10 °C și 25 °C și umiditate a aerului între 10 % și 85 %.
- ▶ A se scutura înainte de utilizare.
- ▶ Închideți din nou recipientul de pulbere cu capacul după utilizare.
- ▶ Nu depășiți durata de funcționare de 2 ani.

### Legea privind ambalajele în vigoare

Eliminați în mod corespunzător ambalajele, conform legislației în vigoare privind ambalajele, prin intermediul unor întreprinderi de gestionare a deșeurilor/firme de reciclare. Respectați în plus sistemul național de preluare. În acest scop, KaVo a dispus autorizarea ambalajelor sale. Aveți în vedere sistemul local, public de eliminare ecologică.

### Siguranță

#### INDICAȚIE

Toate incidentele grave survenite ca urmare a utilizării produsului trebuie comunicate producătorului și autorităților competente ale statului membru în care își are domiciliul utilizatorul și/sau pacientul.

Instrucțiunile de utilizare sunt parte integrantă a produsului și trebuie citite cu atenție înainte de utilizare și păstrate întotdeauna la îndemână.

Produsul trebuie utilizat exclusiv conform scopului pentru care a fost prevăzut; orice utilizare în alt scop decât cel inițial este interzisă.

#### Dotare de protecție

PROPHYflex Perio Powder poate fi aspirată sau poate pătrunde în ochii utilizatorului sau ai pacientului în timpul efectuării tratamentului.

### Instrucțiuni de utilizare

- ▶ Pacientul și utilizatorul trebuie să poarte o protecție pentru ochi.
- ▶ În timpul utilizării, purtați o mască de protecție și mănuși de protecție.
- ▶ În timpul utilizării, folosiți canulele de aspirație mari ale unității de tratament.
- ▶ Aplicați vaselină pe buzele pacientului.
- ▶ După utilizarea pudrei de glicină, spălați-vă pe mâini.
- ▶ După utilizarea pudrei de glicină, curățați fața pacientului (de exemplu cu un prosop umed).
- ▶ Lucrați cu îmbrăcăminte impermeabilă la particule și protecție pentru cap.
- ▶ KaVo recomandă să se lucreze întotdeauna cu cofferdam și dispozitiv de aspirație.

### Descrierea produsului

#### Stabilirea scopului:

KaVo PROPHYflex™ Perio Powder se utilizează pentru tratamentul subgingival, inclusiv împotriva parodontitei și perimplantitei.

KaVo PROPHYflex™ Perio Powder este adecvat pentru utilizarea în aeropolizoare disponibile în comerț.

#### Utilizarea conform destinației:

Această pulbere îndepărtează biofilmul subgingival și este recomandată pentru următoarele proceduri de curățare:

- Îndepărtarea biofilmului parodontal
- Menținerea implanturilor (inclusiv lustruirea implantului de titan)
- Tratamentul suplimentar după prima utilizare în terapia parodontală


#### Contraindicații

- Aeropolizorul nu trebuie utilizat la pacienți care suferă de bronșită cronică sau astm. Jetul de aer și pulbere poate provoca dificultăți de respirație.
- Persoanele vulnerabile pot avea reacții la glicină. În cazul în care se observă reacții alergice, întrerupeți tratamentul și nu mai utilizați produsul. Îndepărtați complet pulberea de la nivelul gurii pacientului.
- Tratamentul pungilor parodontale adânci poate duce la bacteriemie. Pentru pacienții cu risc (sistem imunitar în general slăbit, endocardită), limitați tratamentul în funcție de necesitățile acestora.
- Nu îndreptați jetul de pulbere spre plombe, coroane sau punți; jetul de pulbere poate deteriora restaurările.
- Concremențele și tartrul nu se pot îndepărta cu PROPHYflex™ Perio Powder.

#### Utilizarea

- ▶ Nu depășiți nivelul de umplere maxim indicat pentru pulbere la nivelul recipientului.
- ▶ În cazul pungilor parodontale plate (până la 5 mm) pulverizați fiecare parte a dintelui timp de maximum 5 secunde per pungă.
- ▶ Nu îndreptați jetul spre un punct, ci mișcați-l în sens circular pentru o curățare uniformă.

Unghiul dintre vârful piesei de mână și dinte poate avea între 30° și 60°. Cu cât unghiul este mai mic, cu atât mai adânc se poate pulveriza pulberea în pungă.

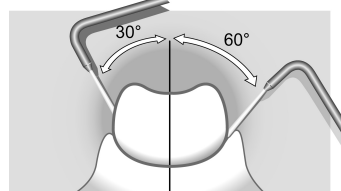

#### Materiale auxiliare

De asemenea, este disponibil pentru tratamentul supragingival:

- Pulbere PROPHYflex™ disponibilă în:
  - Portocaliu (Nr. mat. 1.007.0014)
  - Berry (Nr. mat. 1.007.0015)
  - Cireașă (Nr. mat. 1.007.0016)
  - Mentă (Nr. mat. 1.007.0017)
- PROPHYpearls™ disponibil în:
  - Neutru în baghete (Nr. mat. 1.010.1826)
  - Mentă în baghete (Nr. mat. 1.010.1828)
  - Piersică în baghete (Nr. mat. 1.010.1829)
  - Portocaliu în baghete (Nr. mat. 1.010.1830)
  - Black currant în baghete (Nr. mat. 1.010.1831)
  - Neutru în sticle (Nr. mat. 1.010.1798)
  - Selection în baghete (Nr. mat. 1.013.4400)